

## Artroskopické shavery.

### Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními zdravotnickými předpisy.

### Artroskopické shavery jsou opakovaně použitelné. Mohou být použity 5x až 7x.

Optimální otáčky pro frézy (jednobřité) jsou: 600 – 1 500 otáček za minutu  
a pro vrtáky (vícebřité) jsou: 2 500 – 3 500 otáček za minutu

Artroskopické shavery jsou **autoklávovatelné**.

### Dodržujte prosím následující pokyny:

- ostří nástroje musí být v dobrém stavu
- nepoužívejte frézy, které jsou určeny pro měkké části, na kostní partie a naopak vrtáky, které jsou určeny pro kostní partie, na měkké části.
- před každým použitím provádějte vizuální kontrolu vnitřní a vnější části nástroje.
- vyměňte nástroj pokud vykazuje jakékoliv poškození

### Pokyny pro čištění

Nástroje musí být bezprostředně po použití dekontaminovány a následně důkladně očištěny. Nesmí dojít k zaschnutí nečistot. Nástroje musí být rozebrány a pečlivě vyčištěny. Jednotlivé díly důkladně očištěte vodou. Tyto čistíme kartáčky (96 000-02, 96 000-03) odpovídajících průměrů. K proplachu doporučujeme čistící pistoli (89 500-00), napojenou na vodovodní řád nebo na tlakový vzduch. Doporučujeme čištění v ultrazvukových myčkách.

Doporučujeme, aby nástroje nebyly dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků, alkalických roztoků, chloridů, chlornanů a kyselin, aby byly ponechávány v dezinfekčním a čistícím prostředku po dobu nutnou, doporučenou výrobcem těchto prostředků. Dodržujte předepsané koncentrace.

Po každém způsobu čištění musí být nástroje makroskopicky čisté. Samozřejmostí je hygienická, funkční a technická kontrola.

Před sterilizací musí být nástroje dokonale suché.

Suché nástroje pak před sterilizací promažeme v zámkové a kloubové části medicíálními oleji (139 08 93000).

### Pokyny pro sterilizaci

Pro nástroje doporučujeme sterilizaci parou do teploty 134° C. Vždy je třeba řídit se doporučením výrobce sterilizačních přístrojů.